

見守り 新鮮情報

浴室で使用する**介護用いす**を使用していたところ、片方の**脚**が**突然低くなり**、

バランスを崩して**転倒**し、**頭部**に**打撲傷等**を負った。

(60歳代 男性)



高さ調節できる**入浴用いす**、 急に「脚」が縮んで**転倒**

ひとこと助言

点検してね



見守るくん

- 浴室で、主に高齢者が体や髪の毛を洗うときなどに用いる「入浴用いす」には、脚の高さを調節できる機能が付いたものがあります。このタイプの「入浴用いす」で、脚の部分が縮むことなどにより、使用者がバランスを崩し、転倒する事故が報告されています。
- 入浴用いすの高さ調節部分に鉄製のバネが使われていると、バネにさびが発生し、高さ調節部分が破損することがあります。使用する際は、高さ調節部分に不具合がないかなどをよく点検しましょう。
- 脚を取り外して内部を懐中電灯で照らすと、バネのさびを確認することができます。バネがさびている場合は使用を中止しましょう。
- 入浴用いすを購入する際は、高さ調節部分のバネがさびにくいステンレス製のものを選ぶとよいでしょう。